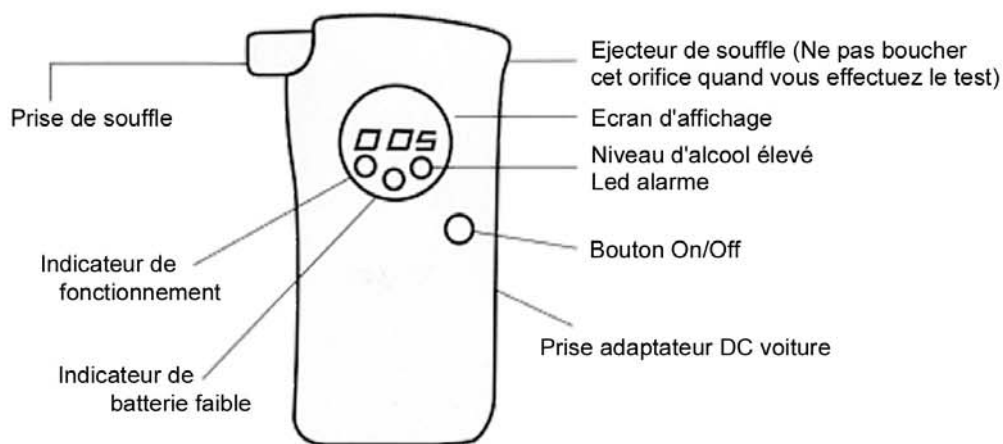



Description Appareil

Made in Corée

Instructions de Fonctionnement:

- 1- Appuyez sur le bouton noir PWR pour mettre en contact
- 2- Le détecteur opère alors un compte à rebours de 200 à 000 visible sur le tableau de bord. Ceci obéit à un process de préchauffage nécessaire pour préparer le capteur et les circuits à votre test.
- 3 - Quand vous entendrez un "bip" et que la lumière verte sera stabilisée sur READY, soufflez avec constance et continuité dans l'embout de prise de souffle jusqu'à ce que vous entendiez de nouveau le "bip". Arrêtez de souffler.
- 4 - Après que les lumières rouge et vert aient simultanément clignoté pendant 4 secondes, le résultat du test s'affichera sur 3 positions.  
Exemple : 0,5 g/L = 0,25 mg/L d'air expiré
- 5 - L'unité s'éteindra automatiquement après affichage des résultats.

**NB: Votre détecteur d'alcool personnel ne peut remplacer les instruments de mesure utilisés dans le cadre de la médecine légale**

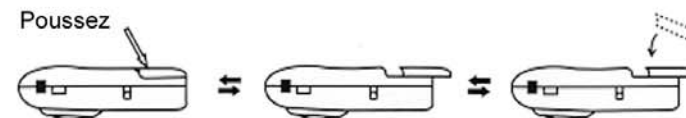Changement de BatterieRecommandations

- 1 - Ne vous testez pas immédiatement après avoir consommé de l'alcool. Il faut 20 minutes environ à l'alcool pour être absorbé par les organes digestifs et être visible dans le sang. C'est aussi le temps qui est nécessaire à l'alcool résiduel qui demeure dans la bouche pour se dissiper.
- 2 - Evitez de vous tester en étant exposé à un vent fort ou dans une pièce où l'air est vicié.
- 3 - Quand l'indicateur de batterie faible est visible, (BAT LOW) changez immédiatement la pile
- 4 - Ne soufflez pas de fumée de cigarette dans l'éthylotest, ceci risquerait d'endommager le détecteur. Il est nécessaire d'attendre au moins une minute après avoir fumé pour faire ce test valablement.
- 5 - En règle générale attendez 20 minutes après avoir bu, mangé ou fumé avant d'effectuer le test.
- 6 - Evitez de souffler du liquide dans l'embout de prise de souffle.
- 7 - Attendez au moins 2 minutes avant de faire un autre test.
- 8 - L'éthylotest a pour seule fonction de mesurer avec précision le taux d'alcool dans le sang. Il n'a pas la capacité de dire si quelqu'un est en état de conduire ou non.

Spécifications

Affichage :	g/L (alerte à 0,5 g/L)
Taille:	120 x60 x25 mm
Poids :	200 gr
Batterie :	9 volts alcaline
Capteur :	semi conducteur à fort pouvoir capteur
Préchauffage :	20 secondes
Temps de réponse :	3 secondes
Fonctionne entre :	10 - 40 ° C
Calibration :	BAC Simulateur
Précision :	+/- 0,1mg/ml(Promile) à 1mg/ml(Promile)

Garantie

Votre appareil est garanti échange standard pour une durée de 3 mois (hors calibration), dans les conditions normales d'utilisation, à partir de la date d'achat.

Cette garantie n'est pas applicable en cas de dommages causés à l'appareil de manière intentionnelle ou non.

**Ce détecteur indique seulement le taux d'alcool dans le sang et en aucune façon si quelqu'un est en état de conduire ou non.**